



Reinigung

Inkontinenzbezug (= als Zubehör erhältlich)

Bestehend aus 100 % Polyester mit TriOnyx Rückenbeschichtung, welche den Stoff wasserabweisend und wasserfest macht, sowie antimikrobiell, urinbeständig und flammhemmend.



Reinigungshinweis:

- Nehmen Sie den Sitzkissenbezug vor der Reinigung ab, indem Sie den Reißverschluss auf der Rückseite öffnen.
- Saugen Sie den Stoff regelmäßig ab, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- Tupfen Sie Verschüttetes so schnell wie möglich mit einem trockenen, saugfähigen Tuch ab.
- Reinigen Sie hartnäckige Flecken mit einem feuchten Tuch oder benutzen Sie dazu Polsterreinigungsschaum.
- Zur Desinfektion kann der Sitzkissenbezug, mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln wischdesinfiziert werden.

Vermeiden Sie:

- Seife oder Reinigungsflüssigkeit auf der Stoffoberfläche zu lassen.
- Einen lösungsmittelhaltigen Reiniger zu verwenden.
- Den Stoff vollständig in Wasser zu tauchen oder zu durchnässen.



Sicherheitshinweis: Desinfektion nur bei der Oberfläche des Bezuges möglich.

Erläuterung
der Symbole:



nicht
waschen



nicht
Bleichen



nicht im
Trommel Trockner
trocknen



nicht
chemisch
reinigen



nicht
bügeln



schwer
entflammbar